

ANTI
BAKTERIELL

MUND NASEN SCHILD

MOUTH-NOSE-SHIELD


ANTI
BESCHLAG

ULTRA
LEICHT
10g

PERFEKTE
TRANS
PARENZ

ALLERGEN
FREIE KINN
AUFLAGE



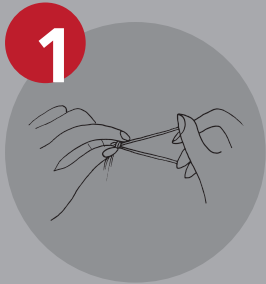

1 Richtige Größe der Ohrschlaufen mit verschiebbarem Gummiring einstellen.
Adjust the length of ear loops via adjustable rings.



2 Die Maske mit der Kinnschale am Kinn anlegen.
Ensure that you fix mask with chin cup on your chin.



3 Tragekomfort durch Nackenband.
Comfortable neck band.



4 Austauschen des Schildes durch Pressen und Schieben.
Substitution of the shield trough simple press and slide.

Innovationssprung bei Mund- und Nasenschildern! The next generation of mouth and nose shields!

Minimiert die Verbreitung von Bakterien, Aerosolen und Speichel.
Mitigates the spread of bacteria, aerosols and saliva.

Ausgestattet mit innovativer Anti-Beschlag Beschichtung, sowie einer Anti-Bakteriellen Oberfläche.
Equipped with an innovative anti-fog coating and anti-bacterial surface.

Kein Hitzestau, ungehindertes Atmen. Optimal auch für Brillenträger.
No heat build-up, unhindered breathing. Also optimal for spectacle wearers.

Allergenfreie weiche Kinnauflage.
Allergen-free sponge on chin support.

Innovatives Design und maximaler Tragekomfort bei minimalem Gewicht (10 g).
Innovative design accompanied with maximum comfort at minimum weight (10 g).

Das optische Polycarbonate Schild ermöglicht perfekte Transparenz.
Keine Irritation durch Licht-Reflexion.
The optical Polycarbonate Shield guarantees the transparency required for daily interaction. No irritating light reflection.

Einfache Reinigung unter fließendem Wasser.
Effortlessly cleaned through simple rinse with running water.

In der Packung inkludiert sind ein Ersatzteil Schild, Nackenband und Reinigungstuch.
The package includes spare shield, neck band and cleaning cloth.

